



东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司
Dongguan Rysam Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd

RYSAM FFP2 NR

Model: RSN95B

Particle filtering half mask (non-medical)



Feature description

Product Dimensions : Particle filtering half mask(non-medical)


Model:RSN95B

Brand :RYSAM

Valve or not : NO

Standard:EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

Performance: confirms to EN149 standards,EUA,ISO ,CE ,white list of CCCMHPIE ,certifications .Alibaba trade Assurance

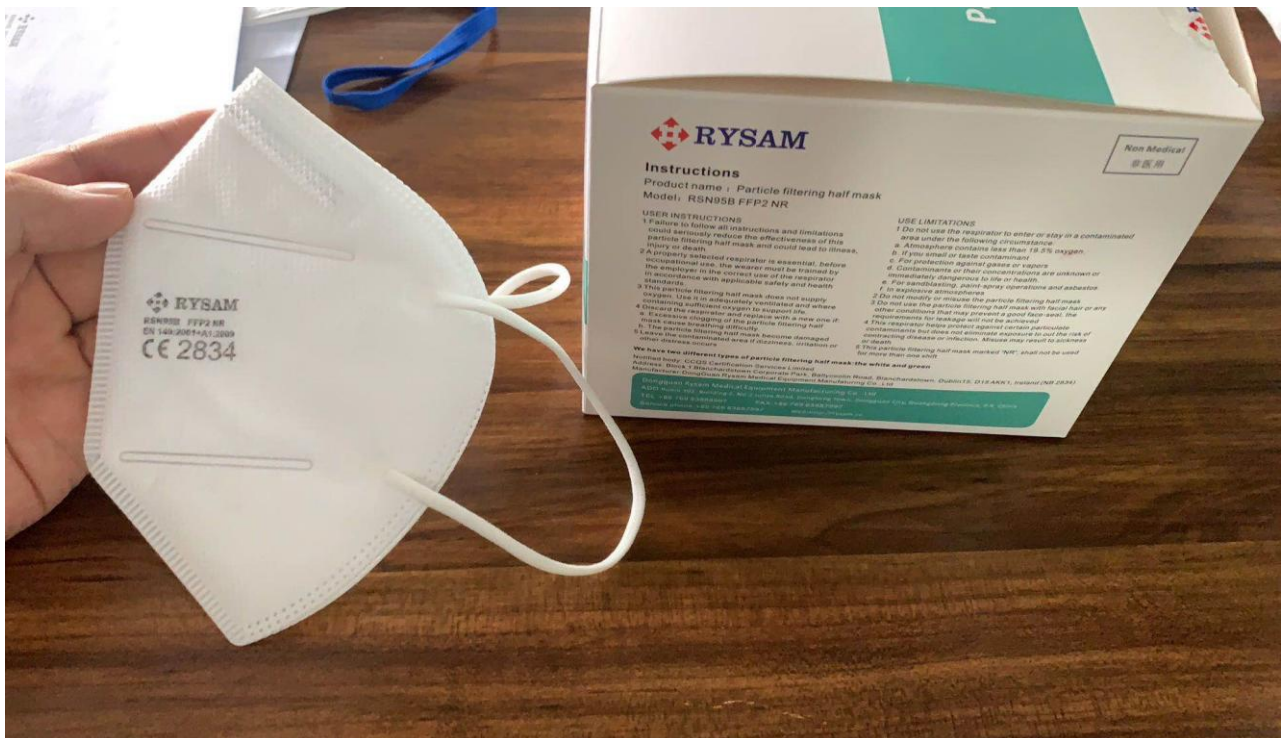

160.00 mm



FFP2 NR
EN 149:2001+A1:2009
Verordnung (EU) 2016/425

CE 2834

FFP2

Atenschutzmaske
Modell RSN95B



Gebrauchsanweisung
siehe Rückseite



Max. Feuchtigkeit
während Lagerung



Ideale Temperatur
während Lagerung



Max. Lagerdauer
siehe Prüfdruck

5 Stk.



Gebrauchsanweisung
Produktname: Atemschutzmaske FFP2
Modell: RSN95B FFP2 NR
Produktionslot: Siehe Aufdruck

Zertifizierter Schutz

- Die Atemschutzmasken schützen den Träger vor festen und flüssigen Partikeln, inkl. mikrobiologisch belasteten Stäuben und Aerosolen (Bakterien, Viren)
- Effizientes 3-Schicht-Filtersystem mit Spunbond, Meltbond, Nonwoven: Hochgradige Filtration von 95% aller Partikel in der Luft
- Eigen- und Fremdschutz: Die Masken filtern sowohl die eingeatmete als auch die ausgestmete Luft
- Optimale Passform: Die V-Form mit Nasenkorrektur und Ohrschleife mit elastischem Band bietet einen hohen Tragekomfort und einen perfekten Sitz
- Geprüft und CE zertifiziert gemäss der Norm EN 149:2001+A1:2009, sowie der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Gebrauchsanleitung



1 Während 20 Sekunden Hände mit Seife waschen, Maske auspacken und mit beiden Händen öffnen



2 Maske über Mund und Nase falten, und die elastischen Ohrschleifen über die Ohren ziehen



3 Falls nötig die Ohrschleifen mit dem beiliegenden Clip verkürzen, bis die Maske eng anliegt



4 Den Nasenbügel mit beiden Zeigefingern an die Nase drücken, bis keine Luft seitlich mehr entweicht



5 Beide Hände vor die Maske halten, um die Dichtigkeit der Maske zu überprüfen

Warnhinweise

- Dieses Produkt ist nur für die einmalige Verwendung bestimmt und muss regelmäßig ersetzt werden
- Die Gebrauchsanweisung sowie die Empfehlungen der SUVA bezüglich dem richtigen Tragen von Masken sind zu befolgen
- Die Maske darf nicht in Kontakt mit offenem Feuer oder aggressiven Chemikalien gelangen
- Defekte oder undichte Masken dürfen nicht verwendet werden
- Haltbarkeit: 3 Jahre nach eingetragtem Produktionsdatum
- In Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern
- Vor direktem Sonnenlicht, Nässe und korrosiven Gasen schützen

Konformitätsbewertungsstelle CE 2834

- CCQZ Certification Services Ltd., Ballinacorney Road, Ballynashardown, Dublin 15, D15 AXK1, Irland
- Konformitätsklärung / Zertifikate siehe www.zubehor.ch

Hersteller


Dongguan Rysam Medical Equipment Manufacturing Co., 3rd Floor, Building 2 Junye Road, Dongfeng Town, Dongguan City, Guangdong Province, China - www.rysam.cn

Importeur in die Schweiz

Saltor Trading & Services AG, Industriestrasse 52, CH-8112 Ostfälligen
<https://www.rysamshop.ch/>



7 640151 174835

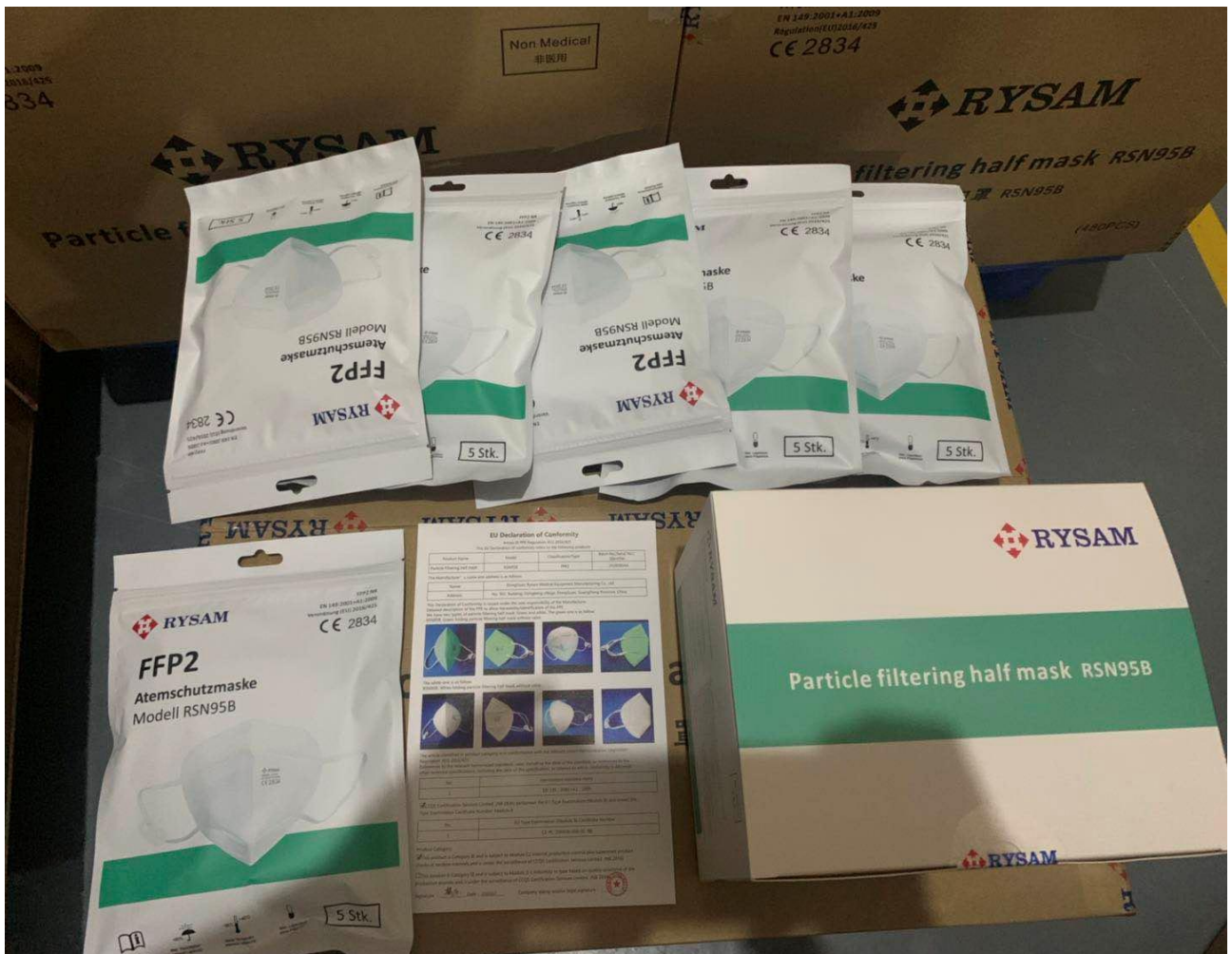



packing:

5pcs/bag, 6bags/chic box

16chic boxes/carton, total 480cps/carton

carton size: 52*45.5*36cm

Gross Weight: 5.76KGS /carton, Volume Weight:14.65KGS/carton