

# Datenblatt

## Desinfektions-Tücher



**Reinigt und desinfiziert in einem Schritt. Wenig schäumend. Enthält keine VOC, Chlorverbindungen oder Quartäre Ammonium Verbindungen (QAV).**

Einmal-Desinfektionstücher zum Einsatz bei Desinfektionsprozessen und zur Vorreinigung chirurgischer Instrumente. Kann als Alternative zu Enzymreinigern und klassischen Reinigungsmitteln verwendet werden.

**wipe-it T** inaktiviert vegetative Bakterien, Hefen und nicht behüllte Viren (z.B. HIV, Hepatitis B/C, Corona) unter verschmutzten und blutverunreinigten Konditionen. Maximale Einwirkzeit 5 Minuten. Die meisten vegetativen Bakterien sind nach 2 Minuten inaktiviert.

### Wirksamkeitstests

Effektiv getestet unter verschmutzten und blutverunreinigten Konditionen laut: EN13624, EN1656, EN13727, EN14349, EN13697 und DW/RKI Richtlinien für Viren.

### Einwirkzeiten

Bakterizid:	5 Minuten
Levurozid:	5 Minuten
Viruzid (Hepatitis-B, HIV, Corona):	5 Minuten
Mykobakterizid:	60 Minuten

### Eigenschaften

Kein Nachwischen mit Wasser nötig. Kompatibel mit unregelmässigen Oberflächen und Instrumenten mit Vertiefungen, da wenig schäumend.

Das Desinfektionsmittel klebt nicht an den Flächen und eventuelle Rückstände können leicht mit einem angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Verfärbungen.



### Einsatzgebiete

- Zur Scheuer-/Wisch Desinfektion empfindlicher Flächen
- Verwendung in Spitälern, Medizinischen Einrichtungen, Restaurants, Schulen, Büros, Fitness Centern
- Geeignet insbesondere für die Lebensmittelindustrie, da keine QAV enthaltend

### Technische Daten:

<b>Anwendung:</b>	Gebrauchsfertig
<b>Zusammensetzung:</b>	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine
<b>Eigenschaften:</b>	Aggregatzustand: flüssig Geruch: nicht spezifisch pH: 8-9
<b>Anwender</b>	Alle

### Lagerung:

Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei im Originalgebinde lagern. Lagerfähigkeit 2 Jahre, innerhalb von 30 Tagen benutzen

### Gebinde:

25 Tücher 30 x 20 cm – ein Tuch reicht für mind. 2m<sup>2</sup>

### Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzmassnahmen gemäss Etikette einhalten. Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzung ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Biozid sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung, Produktinformation lesen